

CleanTand[®]

VERBETERD!



Prothese Reinigingsvloeistof

CleanTand is een product van **DentMerk[®]**

CleanTand®

CleanTand® is een milde vloeistof, door DentMerk ontwikkeld op advies van tandartsen en tandprotheticici, voor het schoonmaken van gebitsprotheses en uitneembare frames, uitneembare beugels, bleekbitjes en gebitsbeschermers.

CleanTand® reinigt grondig zonder het materiaal aan te tasten. Goed voor de mondgezondheid en essentieel voor het goed onderhouden van uw prothese, beugel of bitje.

De schurende werking van veel reinigingsproducten maakt krasjes op het oppervlak. Hierdoor kunnen vuil en bacteriën zich eenvoudig hechten. Bacterie opbouw kan weer leiden tot een slechte adem en irritatie van het tandvlees. Gezond tandvlees zorgt juist voor een goede pasvorm van uw prothese, beugel of bitje. Met CleanTand® bent u verzekerd van een verantwoorde wijze van reinigen.

U kunt CleanTand® gebruiken in combinatie met de DentMerk Sonic Cleaner. U giet een bodempje CleanTand® in de Sonic Cleaner waarna u het verder aanvult met lauw warm water. U legt uw prothese, beugel of bitje in de Cleaner gedurende 5 minuten. Na het reinigingsproces spoelt u uw prothese, beugel of bitje af onder stromend water.





Rokerijweg 12 - 1
1271 AH Huizen

T +31(0)35 - 525 22 92

F +31(0)35 - 525 88 63

E info@dentmerk.nl

W www.dentmerk.nl

Rabobank 13.50.88.437

KvK. nr. 20136894

BTW nr. NL818923362 B01