



CleverCool®

Tooth Whitening Pen



CleverCool™

De Tooth Whitening Pen


Het doel van CleverCool® is patiënten de beste tandheelkundige verzorging te geven. Wij willen dat patiënten producten van de hoogste kwaliteit bij uw praktijk kunnen aanschaffen.




CleverCool®

Veilig, gemakkelijk en snel voor u en uw patiënten

CleverCool® wil een revolutie in de dentale wereld teweegbrengen door tandartspraktijken niet alleen te zien als praktijk, maar ook als winkel. Hierdoor kunnen innovatieve producten met de nieuwste technologie via uw praktijk snel beschikbaar komen voor uw patiënten.

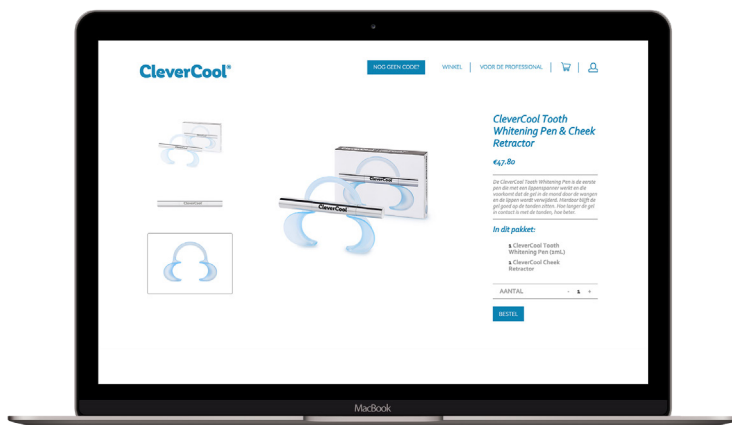

De website van CleverCool® heeft een link naar de site voor de professional en een link naar de winkel voor de patiënten. Als professional dient u zich de eerste keer te registreren alvorens toegang tot de site te krijgen. Na goedkeuring als professional, ontvangt uw praktijk een unieke code. Wanneer uw praktijk producten van CleverCool® verkoopt, geeft u uw patiënt deze unieke code. De praktijk krijgt bij nabestelling van het product door de patiënt, een bonus.

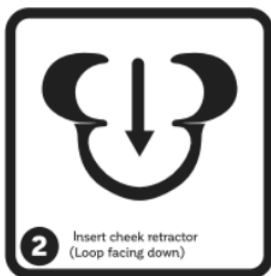

Het gebruik

De CleverCool® Whitening Pen is makkelijk in gebruik. Het pakket bestaat uit een applicatiepen met een kwastje en een lippenspanner. Plaats de lippenspanner rondom uw mond en lippen. Haal vervolgens de dop van de CleverCool® Whitening Pen. Draai aan de onderkant van de pen totdat er een kleine druppel op het kwastje verschijnt (voor de eerste keer, draai een aantal keer langzaam totdat de gel verschijnt). Breng een dun laagje gel direct op de tanden aan en laat de gel tenminste 15 minuten op het oppervlak van de tanden inwerken. Doe dit 2x per dag. U kunt het product vervolgens dagelijks gebruiken totdat het gewenste resultaat is bereikt (meestal binnen twee weken). Doe na gebruik de dop op de pen. Wacht 30 minuten met eten, drinken en/of roken na elke behandeling.

Alle voordelen op een rij

- De praktijk krijgt er nieuwe patiënten bij door het aanbieden van innovatieve producten met de nieuwste CoolProx™ technologie.
- De hoogste kwaliteit dentale verzorgingsproducten zijn verkrijgbaar via de praktijk.



- De patiënt kan het product via internet nabestellen met gebruikmaking van de unieke praktijkcode.
- De praktijk krijgt bij nabestelling van het product door de patiënt, een bonus.

Verrassend snel heb ik mooie witte tanden gekregen door de nieuwe Whitening Pen van CleverCool. Goedkoop en effectief, een betere prijs-kwaliteitverhouding kan je niet krijgen.

- Ingrid Wiersma

Dankzij de CleverCool Whitening Pen durf ik weer te lachen. Heerlijk, wat een uitvinding!

- Marco van der Velden



CleverCool™

Niet meer die bitjes in 's nachts, gewoon simpel met de kwast je tanden bleken, geweldig!

- Sophie de Groot

CleverCool B.V.
Postbus 10194
1001 ED Amsterdam

+31 20 261 38 78

www.clevercool.nl